



ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗАСІБ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ І ПРОМИВАННЯ НОСА «НО-СОЛЬ® ОЧИЩУЮЧИЙ»

ТОРГОВА НАЗВА: Засіб для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий».

ФОРМА ВИПУСКУ:

Засіб для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий» (краплі): по 5 мл (*ml*) або 10 мл (*ml*) у флаконі поліетиленовому, закупореному ковпачком.

Засіб для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий» (спрей): по 10 мл (*ml*) у флаконі із світлозахисного скла, закупореному насосом-дозатором з розпилювачем; по 15 мл (*ml*) у флаконі поліетиленовому, закупореному насадкою з дозатором і ковпачком захисним; по 20 мл (*ml*) у флаконі поліетиленовому, закупореному насосом-дозатором з розпилювачем; по 30 мл (*ml*) або по 50 мл (*ml*) у флаконі скляному з гвинтовим горлом брунатного кольору, закупореному насосом-дозатором з розпилювачем.

ОПИС: прозора безбарвна рідина без запаху.

СКЛАД:

Ізотонічний розчин ропи «Моршинська № 1».

Містить такі мікроелементи: К, Na, Ca, Mg і аніони: Cl, SO₄.

ВЛАСТИВОСТІ ЗАСОБУ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ І ПРОМИВАННЯ НОСА «НО-СОЛЬ® ОЧИЩУЮЧИЙ»:

- Промивання носової порожнини Засобом для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий» призводить до механічного очищення слизової оболонки від пилу, слизових виділень та інших патогенних факторів (бактерій, алергенів, вірусів), діючих на слизову оболонку.
- При запальних захворюваннях носа з рясним утворенням слизу і слизово-гнійних виділень використання Засобу для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий» сприяє більш швидкій евакуації слизу, поліпшує застосування місцевих лікарських засобів і полегшує дихання.
- Засіб для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий» сприяє очищенню слизової оболонки носа від вуличного і кімнатного пилу.
- Завдяки своїм властивостям Засіб для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий» відновлює функції носа, тим самим зменшує місцевий запальний процес та знижує ризик ускладнень.
- Засіб для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий» підтримує нормальний фізіологічний стан слизової оболонки порожнини носа.
- Розріджує слиз та нормалізує його вироблення в слизовій оболонці носової порожнини.
- Покращує функцію миготливого епітелію, що посилює опірність слизової оболонки порожнини носа і додаткових пазух до проникнення патогенних бактерій і вірусів.

Змиває та видаляє алергени і гаптени зі слизової оболонки носа.

ЗАСІБ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ І ПРОМИВАННЯ НОСА «НО-СОЛЬ® ОЧИЩУЮЧИЙ» ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

- Як засіб щоденної гігієни порожнини носа для збереження захисних властивостей слизової оболонки в умовах підвищеної сухості або забруднення повітря (кондиціонування, центральне опалення, задимлене приміщення тощо) з метою збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки у змінених мікрокліматичних умовах.
- При гострих та хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (риніти, синусити).
- Як засіб профілактики та у разі захворювання ГРЗ, ГРВІ, застуді.
- Для очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інфікованого слизу.
- З профілактичною метою для очищення носової порожнини при роботі в шкідливих умовах.
- При інфекційних захворюваннях носа та носоглотки в осінньо-зимовий період.
- У складі комплексного лікування аденоїдів у дітей.
- Для підготовки до введення в порожнину носа лікарських засобів (для поліпшення їх всмоктування).
- Для полегшення стану пацієнта при алергічних, вазомоторних та цілорічних ринітах.

ХТО МОЖЕ ЗАСТОСОВУВАТИ ЗАСІБ ДЛЯ ЗРОШЕННЯ І ПРОМИВАННЯ НОСА «НО-СОЛЬ® ОЧИЩУЮЧИЙ»

У вигляді крапель Засіб для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий» застосовують у дітей з перших днів життя та дорослих. У вигляді спрею застосовують у дітей з 2 років та дорослих.

Засіб для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий» може застосовуватися під час вагітності та в період годування груддю.

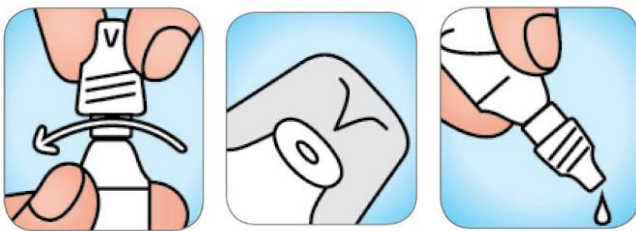
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Щоб уникнути розповсюдження інфекції, рекомендується індивідуальне використання флакона.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Краплі назальні. Дорослим – по 2 краплі; дітям віком від 1 року – по 1-2 краплі; дітям до 1 року – по 1 краплі у кожен носовий хід 3-4 рази на добу з лікувальною метою, з гігієнічною метою – 1-4 рази на добу.

Схема відкриття флакону крапель назальних



- 1) Докрутіть ковпачок до упору за годинниковою стрілкою.
- 2) Спеціальний шип зробить отвір у верхній частині.
- 3) Тепер можна користуватись засобом.

Техніка промивання носа

Промивання носа у дітей рекомендується проводити в положенні лежачи.



- 1) Поверніть голову дитини набік і трохи вперед (не закидаючи голови).
- 2) Введіть кінчик флакона-крапельниці в ніс дитини (у верхній носовий хід) і закачайте 1-2 краплі засобу залежно від віку. Для дітей до 1 року – по 1 краплі, для дітей від 1 року – по 1-2 краплі в кожен носовий хід.
- 3) Проведіть цю процедуру з іншим носовим ходом.

Спрей назальний. Дорослим – по 2 вприскування, дітям віком від 2 років – по 1-2 вприскування у кожен носовий хід 3-4 рази на добу з лікувальною метою, з гігієнічною метою – 1-4 рази на добу.

Техніка промивання носа



- 1) Промивання носа рекомендується проводити стоячи, злегка нахилившись над раковиною.
- 2) Введіть наконечник флакона в носовий хід. Протягом 2-3 секунд промивайте носову порожнину сольовим розчином.
- 3) Прочистіть ніс (висякайтесь, звільніть носові ходи швидким різким видихом через ніс).
- 4) Проведіть цю процедуру з іншим носовим ходом.

Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість та кратність використання Засобу для зрошення і промивання носа «Но-Соль® очищуючий» не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався з медичним виробом

Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, просимо повідомляти про побічні ефекти та інциденти, виявлені у процесі застосування цього медичного виробу, оператору ринку: АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63, тел. +38 (044) 239 19 40.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: при температурі не вище 25 °С в недоступному для дітей місці.

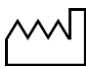

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2 роки. Використати до дати, зазначеній на упаковці.

ВИРОБНИК: АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 74.

Дата останнього перегляду: 30.01.2020 р.



Графічні символи

	Виробник		Верхня межа температурного діапазону
	Дата виготовлення		Ознайомлення з інструкцією для застосування
	Символ можливості повторного використання та перероблення (PAP – з паперу та картону; 21 – інші види картону)		Використати до
	Символ «Національний знак відповідності медичних виробів»		Номер серії (партії)