

**ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ  
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 2,1 %  
ГІПЕРТОНІЧНИЙ**

**Торгова назва:** спрей назальний з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний.

**Опис:** прозорий безбарвний розчин.

**Форма випуску:** спрей назальний.

1 алюмінієвий флакон під тиском, що містить 100 мл спрею.

**СКЛАД:**

100 г спрею містять 100 г стерильної гіпертонічної морської води (розведеної до гіпертонічної концентрації (2,1 %) водою очищеною).

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний створений на основі морської води з Gullmarsfjorden, який являє собою 25-кілометровий морський фіорд, розташований на західному узбережжі Швеції, з якого водозбір здійснюється з глибини 32 метри нижче рівня моря. Після заповнення алюмінієвого флакону кінцевий продукт стерилізується з гарантією стерильності протягом всього терміну зберігання.

**СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 2,1 % ГІПЕРТОНІЧНИЙ  
ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:**

- для зменшення набряку слизової оболонки носової порожнини та зняття закладеності носа;
- для зменшення проявів місцевого запального процесу в носовій порожнині та як засіб для покращення носового дихання;
- як засіб для щоденного зволоження слизової оболонки носа для збереження її захисних фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;
- для виведення алергенів і гаптенів зі слизової оболонки носа;
- для полегшення стану пацієнта при гострих та хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (риніти, синусити);
- у складі комплексного лікування та з метою профілактики ГРЗ, ГРВІ, застуди, для очищення слизової оболонки носу від хвороботворних бактерій і вірусів та полегшення стану пацієнта;
- при інфекційних захворюваннях носа та носоглотки в осінньо-зимовий період;
- у осіб, які страждають на часті риніти і синусити, регулярне використання спрею назального з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний дозволяє скоротити застосування лікарських препаратів;
- для очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інших факторів забруднення повітря;
- для збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки носа особам, що живуть і працюють у приміщеннях з кондиціонером та / або центральним опаленням у змінених мікрокліматичних умовах;
- у осіб, у яких слизова оболонка верхніх дихальних шляхів постійно піддається шкідливим впливам (курці, водії транспортних засобів, робітники гарячих або запиленних цехів, люди, що живуть в регіонах із суворими кліматичними умовами);
- у складі комплексного лікування аденоїдів у дітей;
- для підготовки до введення в порожнину носа лікарських засобів (для поліпшення їх всмоктування);
- догляд за носовою порожниною після хірургічних втручань, для відновлення фізіологічного стану слизової оболонки.

## **ВЛАСТИВОСТІ СПРЕЮ НАЗАЛЬНОГО З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 2,1 % ГІПЕРТОНІЧНИЙ:**

- знімає закладеність носа і відчуття тиску в носових пазухах;
- зменшує набряк слизової оболонки носової порожнини;
- покращує функцію миготливого епітелію, що посилює резистентність слизової оболонки порожнини носа та придаткових пазух до проникнення хвороботворних бактерій і вірусів;
- сприяє очищенню слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інфікованого назального секрету;
- сприяє розрідженню слизу і нормалізації його утворення келихоподібними клітинами слизової оболонки носа;
- допомагає відновити прохідність і нормальне функціонування дихальних шляхів, прискорює одужання під час захворювань носоглотки та придаткових пазух носа;
- допомагає у нормалізації рН назального секрету;
- не містить у своєму складі консервантів;
- являє собою стерильний продукт.

## **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ**

Переконайтеся, що насадка приєднана. Тримуючи флакон під будь-яким кутом, акуратно та послідовно вставте сопло в кожну ніздрю.

Для зрошення швидко натисніть на розпилювач, утримуючи 1-2 секунди, і трохи зачекайте, доки засіб не подіє, а потім прочистіть ніс, обережно видихаючи повітря через нього.

Для промивання нахиліть голову в один бік, вставте сопло в ніздрю, натисніть і утримуйте, поки рідина не почне витікати з носа.

Не відхиляйте голову назад - це може призвести до попадання розчину до горла і викличе дискомфорт. Однак це не заподіє шкоди Вашому здоров'ю.



Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість і кратність використання спрею назального з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

**СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 2,1 % ГІПЕРТОНІЧНИЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ** для дорослих, дітей з 2-х років, вагітних та в період годування груддю.

## **ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ**

Використання засобу більш ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою.

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний можна застосовувати в період вагітності та годування груддю.

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та роботі з іншими механізмами.

## **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний зберігати при температурі від +15 °С до +30 °С. Захищати від сонячного світла.

Флакон під тиском: при нагріванні може вибухнути. Не проколювати і не кидати у вогонь після використання. Тримати подалі від жару, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити. Не піддавати дії температури, що перевищує 50 °С.

Не розпилювати в очі.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:** 3 роки з дати виготовлення. Використати до дати, зазначеної на упаковці та флаконі.

**ВИРОБНИК:** ПАТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 74.

Виготовлено Augena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden (Аурена Лабораторіс ЕйБі, Фьярвіксваген 22, ЕсІ-653 50, Карлстад, Швеція) для ПАТ «Фармак», Україна.

**Дата останнього перегляду.** 22.08.2018.



UA.TR.001