

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ «ПШИК» 2,1 % ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Спрей назальный с морской водой «Пшик» 2,1 % гипертонический.

ФОРМА ВЫПУСКА: спрей назальный.

1 алюминиевый флакон под давлением, содержащий 100 мл (*ml*) спрея

ОПИСАНИЕ: прозрачный бесцветный раствор.

СОСТАВ:

100 г (*g*) спрея содержат 100 г стерильной гипертонической морской воды (разведенной до гипертонической концентрации (2,1 %) водой очищенной).

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 2,1 % гипертонический создан на основе морской воды из Гульмарсфьорден/Gullmarsfjorden, который представляет собой 25-километровый морской фиорд, расположенный на западном побережье Швеции, из которого водозабор осуществляется с глубины 32 м (*m*) ниже уровня моря. После заполнения алюминиевого флакона конечный продукт стерилизуется с гарантией стерильности в течение всего срока хранения.

СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ «ПШИК» 2,1 % ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- для уменьшения отека слизистой оболочки носовой полости и снятия заложенности носа;
- для уменьшения проявлений местного воспалительного процесса в носовой полости и как средство для улучшения носового дыхания;
- как средство для ежедневного увлажнения слизистой оболочки носа для сохранения ее защитных физиологических свойств в условиях повышенной сухости воздуха;
- для выведения аллергенов и гаптеннов из слизистой оболочки носа;
- для облегчения состояния пациента при острых и хронических воспалительных заболеваниях носоглотки, придаточных пазух носа и носовой полости различной этиологии (риниты, синуситы);
- в составе комплексного лечения и с целью профилактики ОРЗ, ОРВИ, простуды, для очищения слизистой оболочки носа от болезнетворных бактерий и вирусов и облегчения состояния пациента;
- при инфекционных заболеваниях носа и носоглотки в осеннее - зимний период;
- у лиц, страдающих частыми ринитами и синуситами, регулярное применения спрея назального с морской водой «Пшик» 2,1 % гипертонический позволяет сократить применение лекарственных препаратов;
- для очищения слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и других факторов загрязнения воздуха;
- для сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки носа лицам, живущим и работающим в помещениях с кондиционером и/или центральным отоплением в измененных микроклиматических условиях;
- у лиц, у которых слизистая оболочка верхних дыхательных путей постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители транспортных средств, работники горячих или запыленных цехов, люди, живущие в регионах с суровыми климатическими условиями);
- в составе комплексного лечения аденоидов у детей;
- для подготовки к введению в полость носа лекарственных средств (для улучшения их всасывания);
- уход за носовой полостью после хирургических вмешательств, для восстановления физиологического состояния слизистой оболочки.

СВОЙСТВА СПРЕЯ НАЗАЛЬНОГО С МОРСКОЙ ВОДОЙ «ПШИК» 2,1 % ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ:

(штамп)
КОНТРОЛЬНЫЙ

- снимает заложенность носа и ощущение давления в носовых пазухах;
- уменьшает отек слизистой оболочки носовой полости;
- улучшает функцию мерцательного эпителия, что усиливает резистентность слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к проникновению болезнетворных бактерий и вирусов;
- содействует очищению слизистой оболочки носа от пыли, аллергенов и инфицированного назального секрета;
- содействует разжижению слизи и нормализации ее образования бокаловидными клетками слизистой оболочки носа;
- помогает восстановить проходимость и нормальное функционирование дыхательных путей, ускоряет выздоровление во время заболеваний носоглотки и придаточных пазух носа;
- помогает в нормализации pH назального секрета;
- не содержит в своем составе консервантов;
- является стерильным продуктом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Убедитесь, что насадка прикреплена. Удерживая флакон под любым углом, аккуратно и последовательно вставьте сопло в каждую ноздрю.

Для орошения быстро нажмите на распылитель, удерживая 1-2 секунды, и немного подождите, пока средство не подействует, а затем прочистите нос, осторожно выдыхая воздух через него.

Для промывания наклоните голову в одну сторону, вставьте сопло в ноздрю, нажмите и удерживайте до тех пор, пока жидкость не начнет вытекать из носа.

Не отклоняйте голову назад – это может привести к попаданию раствора в горло и вызовет дискомфорт. Однако это не принесет вреда Вашему здоровью.



Благодаря химическому составу и концентрации длительность и кратность применения спрея назального с морской водой «Пшик» 2,1 % гипертонический не ограничены, изделие является безопасным при длительном применении, не вызывает привыкания.

СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ «ПШИК» 2,1 % ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ для взрослых, детей с 2-х лет, беременных и в период кормления грудью.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение изделия более, чем одним лицом может вызвать распространение инфекции, поэтому после каждого применения следует вымыть наконечник насадки с мылом и ополоснуть горячей водой.

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 2,1 % гипертонический можно применять в период беременности и кормления грудью.

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 2,1 % гипертонический не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.

Сообщение о каком-либо серьезном инциденте, случившемся с медицинским изделием

(штамп)
КОНТРОЛЬНЫЙ

Для обеспечения дальнейшего эффективного и безопасного применения медицинского изделия просим сообщать о побочных эффектах и инцидентах, обнаруженных в процессе применения этого медицинского изделия, оператору рынка: АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская 63, тел. +38 (044) 239 19 40.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Спрей назальный с морской водой «Пшик» 2,1 % гипертонический хранить при температуре от +15 °С до + 30 °С. Защищать от солнечного света.

Флакон под давлением: при нагревании может взорваться. Не прокалывать и не бросать в огонь после использования. Держать вдали от жара, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других очагов возгорания. Не курить. Не подвергать действию температуры, превышающей 50 °С. Не распылять в глаза.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты изготовления. Использовать до даты, указанной на упаковке и флаконе.










ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Произведено Аурена Лабораторис ЭйБи, Фьярвиксваген 226 ЭсИ-653 50 Карлстад, Швеция/Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АО «Фармак», Украина.

Дата последнего пересмотра. 08.11.2019 г.



Графические символы

	Производитель		Ограничение температуры
	Оберегать от солнечного света		Ознакомление с инструкцией для применения
	Символ возможности повторного использования и переработки (PAP – из бумаги и картона; 21 – другие виды картона)		Стерилизовано с использованием излучения
	Символ «Национальный знак соответствия медицинских изделий»		Номер серии (партии)
	Использовать до		

(штамп)
КОНТРОЛЬНЫЙ