



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
медичного виробу
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ
«ПШИК®» 0,9 % ДЛЯ ДІТЕЙ

ТОРГОВА НАЗВА

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 0,9 % для дітей.

ФОРМА ВИПУСКУ

Спрей назальний.

1 алюмінієвий флакон під тиском, що містить 100 мл (ml) спрею.

Маса нетто - 100±2 г (g).

ОПИС

Прозора, безбарвна рідина вільна від сторонніх часток.

СКЛАД:

100 г (g) спрею містять 100 г (g) стерильної ізотонічної морської води (розведеної до фізіологічного рівня (0,9 %) водою очищеною).

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 0,9 % для дітей створений на основі морської води з Гультмарсфьорден/Gullmarsfjorden, який являє собою 25-кілометровий морський фіорд, розташований на західному узбережжі Швеції, з якого водозбір здійснюється з глибини 32 м (m) нижче рівня моря. Після заповнення алюмінієвого флакону кінцевий продукт стерилізується з гарантією стерильності протягом всього терміну зберігання.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

для дітей усіх вікових категорій та дорослих

- для полегшення стану пацієнта при гострих та хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (риніти, синусити);
- у складі комплексного лікування та з метою профілактики ГРЗ, ГРВІ, застуди;
- покращує функцію миготливого епітелію, що посилює резистентність слизової оболонки порожнини носа та придаткових пазух до проникнення хвороботворних бактерій і вірусів;
- для очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інших факторів забруднення повітря;
- допомагає відновити прохідність і нормальне функціонування дихальних шляхів, прискорює одужання під час захворювань носоглотки та придаткових пазух носа.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 0,9 % для дітей завдяки наявності спеціального запобіжного комірця наконечника, забезпечує просте застосування без будь-якого ризику.

НЕМОВЛЯТА.


1. Переконайтеся, що насадка приєднана. Немовля покласти на лівий бік. Тримавши флакон під будь-яким кутом, обережно ввести сопло у правий носовий хід до рівня запобіжного комірця. Для зрошення швидко натисніть на розпилювач, утримуючи 1-2 с (s), і трохи зачекайте, доки засіб не подіє, а потім, після процедури, голову немовляти тримайте прямо, даючи рідині вільно витікати з носа, витираючи її гігієнічною хусткою.

Для промивання натисніть і утримуйте, поки рідина не почне витікати з носа.

2. Поклавши немовля на правий бік, повторити процедуру з лівим носовим отвором.

3. Після процедури голову немовляти тримають прямо, даючи рідині вільно витікати з носа, витираючи її гігієнічною хусткою.

Процедуру повторюють 2-3 рази на день, до прийому їжі.

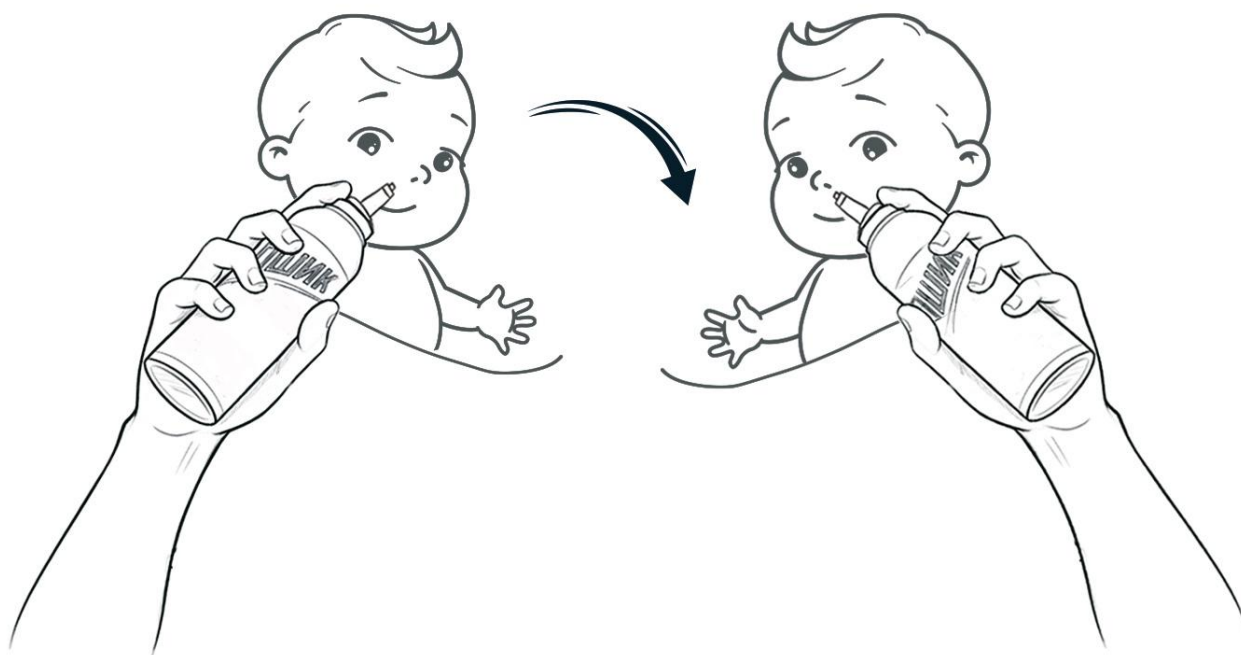

ДІТИ.

1. Переконайтеся, що насадка приєднана. Коли дитина може сидіти, лежати або стояти самостійно, виберіть найбільш зручну для неї позицію.


Тримаючи флакон під будь-яким кутом, обережно ввести сопло у правий носовий хід до рівня запобіжного комірця. Для зрошення швидко натисніть на розпилювач, утримуючи 1-2 с (s), і трохи зачекайте, доки засіб не подіє, а потім, після процедури, голову дитини тримайте прямо, даючи рідині вільно витікати з носа, витираючи її гігієнічною хусткою.

Для промивання натисніть і утримуйте, поки рідина не почне витікати з носа.

2. Повторити процедуру з лівим носовим отвором.

3. Після процедури голову дитини тримають прямо, даючи рідині вільно витікати з носа, витираючи її гігієнічною хусткою.

Процедуру повторюють 2-3 рази на день, до прийому їжі.

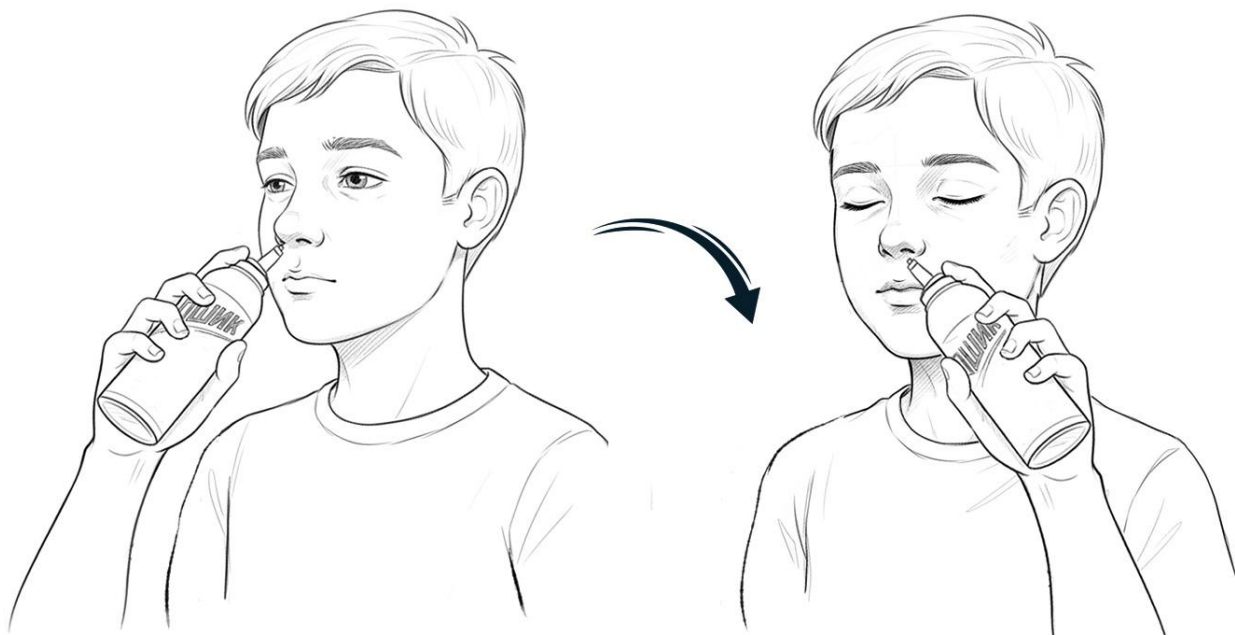

Після кожного застосування медичного виробу слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою.

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 0,9 % для дітей можна застосовувати в період вагітності та годування груддю.

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 0,9 % для дітей не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та роботі з іншими механізмами.

Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість і кратність використання спрею назального з морською водою «Пшик®» 0,9 % для дітей не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

Не містить консервантів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Увага! Флакон не кидати!

Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання. Не проколювати та не спалювати, навіть після використання. Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. Не допускати нагрівання вище 50 °С. Зберігати в місці, недоступному для дітей.

Не розпилювати в очі.

Номер партії вказано на пакуванні.

Не використовувати медичний виріб в разі пошкодження первинного пакування (флакону).

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався при застосуванні медичного виробу

Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, просимо повідомляти про інциденти, виявлені у процесі застосування цього медичного виробу, АТ «Фармак» за телефоном +38 (044) 239 19 40.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 0,9 % для дітей зберігати при температурі від +15 °С до +30 °С. Захищати від сонячного світла.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

3 роки з дати виготовлення. Використати до дати, зазначеної на пакуванні.

ВИРОБНИК

АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.

Виготовлено: Аурена Лабораторіс ЕйБі, Фьяррвіксваген 22, ЕсІ-653 50 Карлстад, Швеція/Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АТ «Фармак», Україна.

www.farmak.ua

Дата останнього перегляду: 17.02.2026.



UA.TR.001

Графічні символи

	Виробник		Температурне обмеження
	Оберігати від сонячного світла		Зверніться до інструкції із застосування
	Символ можливості повторного використання та перероблення (PAP – з паперу та картону; 21 – інші види картону)		Стерилізовано опроміненням
	Знак відповідності Технічним регламентам (UA - умовне позначення України латинськими літерами; TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів; YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності)		Номер партії
	Використати до		Не використовувати в разі пошкодження пакування
	Попередження		Знак відповідності Технічному регламенту аерозольних розпилювачів