



## ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ медичного виробу

### СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 0,9 % ДЛЯ ДІТЕЙ

**ТОРГОВА НАЗВА:** Спрей назальний з морською водою «Пшик» 0,9 % для дітей.

**ФОРМА ВИПУСКУ:** спреї назальний.

1 алюмінієвий флакон під тиском, що містить 100 мл (ml) спрею.

**ОПИС:** прозорий безбарвний або жовтуватий розчин.

#### **СКЛАД:**

100 г (g) спрею містять 100 г (g) стерильної ізотонічної морської води (розведеної до фізіологічного рівня (0,9 %) водою очищеною).

Спреї назальний з морською водою «Пшик» 0,9 % для дітей створений на основі морської води з Гульмарсфьорден/Gullmarsfjorden, який являє собою 25-кілометровий морський фіорд, розташований на західному узбережжі Швеції, з якого водозбір здійснюється з глибини 32 м (m) нижче рівня моря. Після заповнення алюмінієвого флакону кінцевий продукт стерилізується з гарантією стерильності протягом всього терміну зберігання.

#### **СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 0,9 % ДЛЯ ДІТЕЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ для дітей усіх вікових груп та дорослих:**

- як засіб для щоденного зволоження слизової оболонки носа для збереження її захисних фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;
- для виведення алергенів і гаптенів зі слизової оболонки носа;
- для полегшення стану пацієнта при гострих та хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (риніти, синусити);
- у складі комплексного лікування та з метою профілактики ГРЗ, ГРВІ, застуди, для очищення слизової оболонки носу від хвороботворних бактерій і вірусів та полегшення стану пацієнта;
- при інфекційних захворюваннях носа та носоглотки в осінньо-зимовий період;
- для зменшення проявів місцевого запального процесу в носовій порожнині;
- у осіб, які страждають на часті риніти і синусити, регулярне використання спрею назального з морською водою «Пшик» 0,9 % для дітей дозволяє скоротити застосування лікарських препаратів;
- для очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інших факторів забруднення повітря;
- у складі комплексного лікування аденоїдів у дітей;
- для підготовки до введення в порожнину носа лікарських засобів (для поліпшення їх всмоктування);
- догляд за носовою порожниною після хірургічних втручань, для відновлення фізіологічного стану слизової оболонки.

#### **ВЛАСТИВОСТІ СПРЕЮ НАЗАЛЬНОГО З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 0,9 % ДЛЯ ДІТЕЙ:**

- покращує функцію миготливого епітелію, що посилює резистентність слизової оболонки порожнини носа та придаткових пазух до проникнення хвороботворних бактерій і вірусів;
- сприяє очищенню слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інфікованого назального секрету;

- сприяє розрідженню слизу і нормалізації його утворення келихоподібними клітинами слизової оболонки носа;
- допомагає відновити прохідність і нормальне функціонування дихальних шляхів, прискорює одужання під час захворювань носоглотки та придаткових пазух носа;
- знімає закладеність носа і відчуття тиску в носових пазухах;
- допомагає у нормалізації рН назального секрету;
- не містить у своєму складі консервантів;
- являє собою стерильний продукт.

### **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: НЕМОВЛЯТА.**

1. Переконайтеся, що насадка приєднана. Немовля покласти на лівий бік. Тримавши флакон під будь-яким кутом, обережно ввести сопло у правий носовий хід до рівня запобіжного комірця.

Для зрошення швидко натисніть на розпилювач, утримуючи 1-2 секунди, і трохи зачекайте, доки засіб не подіє, а потім, після процедури, голову немовляти тримайте прямо, даючи рідині вільно витікати з носа, витираючи її гігієнічною хусткою.

Для промивання натисніть і утримуйте, поки рідина не почне витікати з носа.

2. Поклавши немовля на правий бік, повторити процедуру з лівим носовим отвором.

3. Після процедури голову немовляти тримають прямо, даючи рідині вільно витікати з носа, витираючи її гігієнічною хусткою.

Процедуру повторюють 2-3 рази на день, до прийому їжі.

### **ДІТИ.**

1. Переконайтеся, що насадка приєднана. Коли дитина може сидіти, лежати або стояти самостійно, виберіть найбільш зручну для неї позицію.

Тримавши флакон під будь-яким кутом, обережно ввести сопло у правий носовий хід до рівня запобіжного комірця.

Для зрошення швидко натисніть на розпилювач, утримуючи 1-2 секунди, і трохи зачекайте, доки засіб не подіє, а потім, після процедури, голову дитини тримайте прямо, даючи рідині вільно витікати з носа, витираючи її гігієнічною хусткою.

Для промивання натисніть і утримуйте, поки рідина не почне витікати з носа.

2. Повторити процедуру з лівим носовим отвором.

3. Після процедури голову дитини тримають прямо, даючи рідині вільно витікати з носа, витираючи її гігієнічною хусткою.

Процедуру повторюють 2-3 рази на день, до прийому їжі.

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 0,9 % для дітей (для немовлят та дітей) завдяки наявності спеціального запобіжного комірця наконечника, забезпечує просте застосування без будь-якого ризику.



Застосування дітям до 6 місяців має відбуватися суворо за показаннями та під наглядом дорослих.

### **ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:**

Використання засобу більш ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою.

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 0,9 % для дітей можна застосовувати в період вагітності та годування груддю.

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 0,9 % для дітей не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та роботі з іншими механізмами.

Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість і кратність використання спрею назального з морською водою «Пшик» 0,9 % для дітей не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався при застосуванні медичного виробу

Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, просимо повідомляти про інциденти, виявлені у процесі застосування цього медичного виробу, АТ «Фармак» за телефоном +38 (044) 239 19 40.

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 0,9 % для дітей зберігати при температурі від +15 °С до +30 °С. Захищати від сонячного світла.



#### Попередження!

Флакон не кидати!

Флакон під тиском: при нагріванні може вибухнути. Не проколувати і не кидати у вогонь після використання. Тримати подалі від жару, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити. Не піддавати дії температури, що перевищує 50 °С.

Не розпилювати в очі. Зберігати в недоступному для дітей місці.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:** 3 роки з дати виготовлення. Використати до дати, зазначеної на упаковці та флаконі.

**ВИРОБНИК:** АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.

Виготовлено: Аурена Лабораторіс ЕйБі, Фьярвіксваген 22, ЕсІ-653 50 Карлстад, Швеція/Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АТ «Фармак», Україна.











www.farmak.ua

Дата останнього перегляду: 20.02.2024.



UA.TR.001

### Графічні символи

	Виробник		Температурне обмеження
	Оберігати від сонячного світла		Зверніться до інструкції із застосування
	Символ можливості повторного використання та перероблення (PAP – з паперу та картону; 21 – інші види картону)		Стерилізовано опроміненням
	Знак відповідності Технічним регламентам (UA - умовне позначення України латинськими літерами; TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів; YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності)		Номер серії (партії)
	Використати до		Не використовувати в разі пошкодження пакування



Вказує на необхідність для користувача ознайомитися із такою важливою інформацією інструкції із застосування, як попередження

