



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
медичного виробу
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ
«ПШИК®» 2,1 % ГІПЕРТОНІЧНИЙ

ТОРГОВА НАЗВА

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 2,1 % гіпертонічний.

ФОРМА ВИПУСКУ

Спрей назальний.

1 алюмінієвий флакон під тиском, що містить 100 мл (ml) спрею.

Маса нетто - 100±2 г (g).

ОПИС

Прозора, безбарвна рідина вільна від сторонніх часток.

СКЛАД:

100 г (g) спрею містять 100 г (g) стерильної гіпертонічної морської води (розведеної до гіпертонічної концентрації (2,1 %) водою очищеною).

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 2,1 % гіпертонічний створений на основі морської води з Гульмарсфьорден/Gullmarsfjorden, який являє собою 25-кілометровий морський фіорд, розташований на західному узбережжі Швеції, з якого водозбір здійснюється з глибини 32 м (m) нижче рівня моря. Після заповнення алюмінієвого флакону кінцевий продукт стерилізується з гарантією стерильності протягом всього терміну зберігання.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

для дорослих та дітей від 2-х років


- для полегшення стану пацієнта при гострих та хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (риніти, синусити);
- у складі комплексного лікування та з метою профілактики ГРЗ, ГРВІ, застуди;
- для зменшення набряку слизової оболонки носової порожнини та зняття закладеності носа;
- покращує функцію миготливого епітелію, що посилює резистентність слизової оболонки порожнини носа та придаткових пазух до проникнення хвороботворних бактерій і вірусів;
- для очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інших факторів забруднення повітря;
- допомагає відновити прохідність і нормальне функціонування дихальних шляхів, прискорює одужання під час захворювань носоглотки та придаткових пазух носа.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Переконайтеся, що насадка приєднана. Тримавши флакон під будь-яким кутом, акуратно та послідовно вставте сопло в кожен ніздрю.

Для зрошення швидко натисніть на розпилювач, утримуючи 1-2 с (s), і трохи зачекайте, доки засіб не подіє, а потім прочистіть ніс, обережно видихаючи повітря через нього.

Для промивання нахиліть голову в один бік, вставте сопло в ніздрю, натисніть і утримуйте, поки рідина не почне витікати з носа. Не відхиляйте голову назад - це може призвести до попадання розчину до горла і викличе дискомфорт. Однак це не заподіє шкоди Вашому здоров'ю.

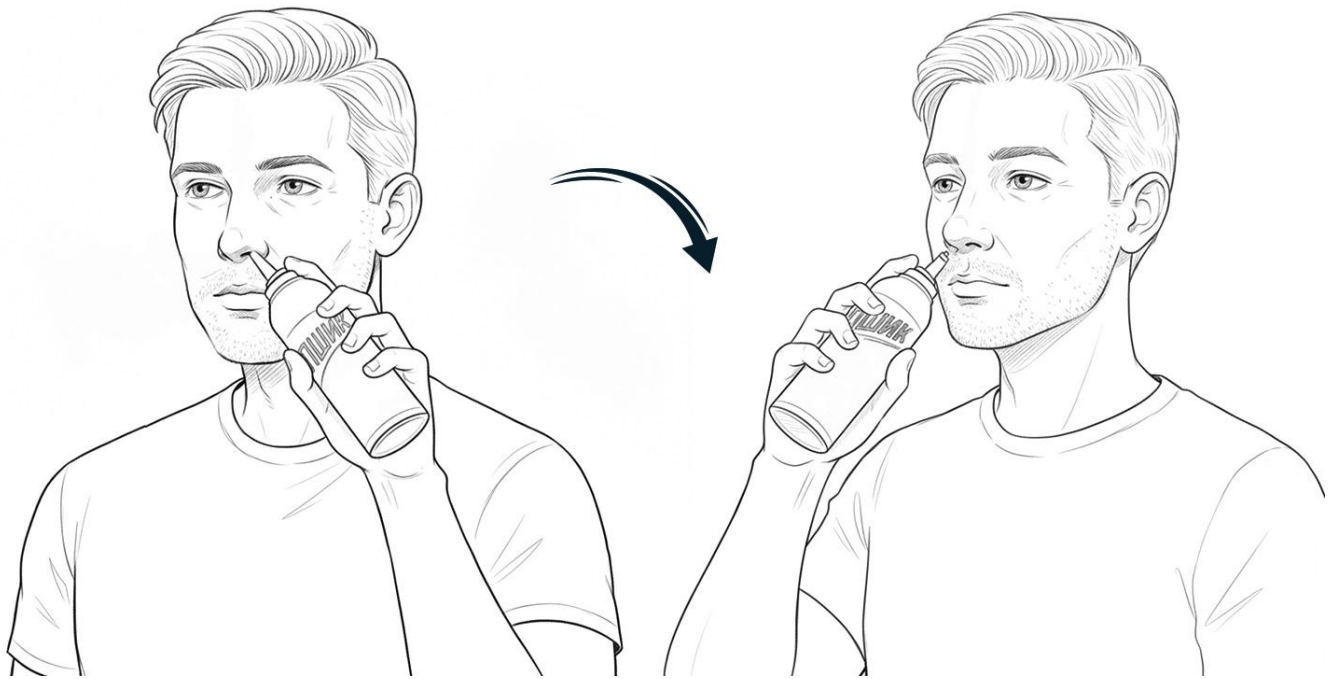

Після кожного застосування медичного виробу слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою.

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 2,1 % гіпертонічний можна застосовувати в період вагітності та годування груддю.

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 2,1 % гіпертонічний не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та роботі з іншими механізмами.

Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість і кратність використання спрею назального з морською водою «Пшик®» 2,1 % гіпертонічний не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

Не містить консервантів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Увага! Флакон не кидати!

Смніть під тиском. Може вибухнути під час нагрівання. Не проколювати та не спалювати, навіть після використання. Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. Не допускати нагрівання вище 50 °С. Зберігати в місці, недоступному для дітей.

Не розпилювати в очі.

Номер партії вказано на пакуванні.

Не використовувати медичний виріб в разі пошкодження первинного пакування (флакону).

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався при застосуванні медичного виробу

Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, просимо повідомляти про інциденти, виявлені у процесі застосування цього медичного виробу, АТ «Фармак» за телефоном +38 (044) 239 19 40.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Спрей назальний з морською водою «Пшик®» 2,1 % гіпертонічний зберігати при температурі від +15 °C до +30 °C. Захищати від сонячного світла.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

3 роки з дати виготовлення. Використати до дати, зазначеної на пакуванні.

ВИРОБНИК

АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.

Виготовлено: Аурена Лабораторіс ЕйБі, Фьяррвіксваген 22, ЕсІ-653 50 Карлстад, Швеція/Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АТ «Фармак», Україна.
www.farmak.ua

Дата останнього перегляду: 17.02.2026.



UA.TR.001

Графічні символи

	Виробник		Температурне обмеження
	Оберігати від сонячного світла		Зверніться до інструкції із застосування
	Символ можливості повторного використання та перероблення (PAP – з паперу та картону; 21 – інші види картону)		Стерилізовано опроміненням
	Знак відповідності Технічним регламентам (UA - умовне позначення України латинськими літерами; TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів; YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності)		Номер партії
	Використати до		Не використовувати в разі пошкодження пакування
	Попередження		Знак відповідності Технічному регламенту аерозольних розпилювачів