



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
медичного виробу
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 2,1 %
ГІПЕРТОНІЧНИЙ

ТОРГОВА НАЗВА: Спрей назальний з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний.

ФОРМА ВИПУСКУ: спрей назальний.

1 алюмінієвий флакон під тиском, що містить 100 мл (ml) спрею.

ОПИС: прозорий безбарвний розчин.

СКЛАД:

100 г (g) спрею містять 100 г (g) стерильної гіпертонічної морської води (розведеної до гіпертонічної концентрації (2,1 %) водою очищеною).

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний створений на основі морської води з Гульмарсфьорден/Gullmarsfjorden, який являє собою 25-кілометровий морський фіорд, розташований на західному узбережжі Швеції, з якого водозбір здійснюється з глибини 32 м (m) нижче рівня моря. Після заповнення алюмінієвого флакону кінцевий продукт стерилізується з гарантією стерильності протягом всього терміну зберігання.

СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 2,1 % ГІПЕРТОНІЧНИЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ:

- для зменшення набряку слизової оболонки носової порожнини та зняття закладеності носа;
- для зменшення проявів місцевого запального процесу в носовій порожнині та як засіб для покращення носового дихання;
- як засіб для щоденного зволоження слизової оболонки носа для збереження її захисних фізіологічних властивостей в умовах підвищеної сухості повітря;
- для виведення алергенів і гаптенів зі слизової оболонки носа;
- для полегшення стану пацієнта при гострих та хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа та носової порожнини різної етіології (риніти, синусити);
- у складі комплексного лікування та з метою профілактики ГРЗ, ГРВІ, застуди, для очищення слизової оболонки носу від хвороботворних бактерій і вірусів та полегшення стану пацієнта;
- при інфекційних захворюваннях носа та носоглотки в осінньо-зимовий період;
- у осіб, які страждають на часті риніти і синусити, регулярне використання спрею назального з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний дозволяє скоротити застосування лікарських препаратів;
- для очищення слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інших факторів забруднення повітря;
- для збереження фізіологічних характеристик слизової оболонки носа особам, що живуть і працюють у приміщеннях з кондиціонером та / або центральним опаленням у змінених мікрокліматичних умовах;
- у осіб, у яких слизова оболонка верхніх дихальних шляхів постійно піддається шкідливим впливам (курці, водії транспортних засобів, робітники гарячих або запилених цехів, люди, що живуть в регіонах із суворими кліматичними умовами);

- у складі комплексного лікування аденоїдів у дітей;
- для підготовки до введення в порожнину носа лікарських засобів (для поліпшення їх всмоктування);
- догляд за носовою порожниною після хірургічних втручань, для відновлення фізіологічного стану слизової оболонки.

ВЛАСТИВОСТІ СПРЕЮ НАЗАЛЬНОГО З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 2,1 % ГІПЕРТОНІЧНИЙ:

- знімає закладеність носа і відчуття тиску в носових пазухах;
- зменшує набряк слизової оболонки носової порожнини;
- покращує функцію миготливого епітелію, що посилює резистентність слизової оболонки порожнини носа та придаткових пазух до проникнення хвороботворних бактерій і вірусів;
- сприяє очищенню слизової оболонки носа від пилу, алергенів та інфікованого назального секрету;
- сприяє розрідженню слизу і нормалізації його утворення келихоподібними клітинами слизової оболонки носа;
- допомагає відновити прохідність і нормальне функціонування дихальних шляхів, прискорює одужання під час захворювань носоглотки та придаткових пазух носа;
- допомагає у нормалізації рН назального секрету;
- не містить у своєму складі консервантів;
- являє собою стерильний продукт.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

Переконайтеся, що насадка приєднана. Тримайте флакон під будь-яким кутом, акуратно та послідовно вставте сопло в кожну ніздрю.

Для зрошення швидко натисніть на розпилювач, утримуючи 1-2 секунди, і трохи зачекайте, доки засіб не подіє, а потім прочистіть ніс, обережно видихаючи повітря через нього.

Для промивання нахиліть голову в один бік, вставте сопло в ніздрю, натисніть і утримуйте, поки рідина не почне витікати з носа.

Не відхиляйте голову назад - це може призвести до попадання розчину до горла і викличе дискомфорт. Однак це не заподіє шкоди Вашому здоров'ю.



Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість і кратність використання спрею назального з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «ПШИК» 2,1 % ГІПЕРТОНІЧНИЙ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ для дорослих, дітей з 2-х років, вагітних та в період годування груддю.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Використання засобу більш ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після

кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою. Спрей назальний з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний можна застосовувати в період вагітності та годування груддю.

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та роботі з іншими механізмами.

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався при застосуванні медичного виробу

Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, просимо повідомляти про інциденти, виявлені у процесі застосування цього медичного виробу, АТ «Фармак» за телефоном +38 (044) 239 19 40.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Спрей назальний з морською водою «Пшик» 2,1 % гіпертонічний зберігати при температурі від +15 °С до +30 °С. Захищати від сонячного світла.

Флакон під тиском: при нагріванні може вибухнути. Не проколювати і не кидати у вогонь після використання. Тримати подалі від жару, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити. Не піддавати дії температури, що перевищує 50 °С.

Не розпилювати в очі.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки з дати виготовлення. Використати до дати, зазначеної на упаковці та флаконі.









ВИРОБНИК: АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.

Виготовлено: Аурена Лабораторіс ЕйБі, Фьярвіксваген 22, Есі-653 50 Карлстад, Швеція/Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АТ «Фармак», Україна.
www.farmak.ua

Дата останнього перегляду: 26.09.2022.



Графічні символи

	Виробник		Температурне обмеження
	Оберігати від сонячного світла		Зверніться до інструкції із застосування
	Символ можливості повторного використання та перероблення (PAP – з паперу та картону; 21 – інші види картону)		Стерилізовано опроміненням
	Знак відповідності Технічним регламентам (UA - умовне позначення України латинськими літерами; TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів; YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності)		Номер серії (партії)



Використати до



Не використовувати в разі
пошкодження пакування