

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ «СПАРКЛИН»

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: Спрей назальный с морской водой «Спарклин».

ФОРМА ВЫПУСКА: спрей назальный.

1 алюминиевый флакон под давлением, содержащий 125 мл (*ml*) спрея

ОПИСАНИЕ: прозрачный бесцветный раствор.

СОСТАВ:

100 г (*g*) спрея содержат 100 г стерильной изотонической морской воды (разведенной до гипертонической концентрации (0,9 %) водой очищенной), с добавлением 0,4 % CO₂, что создает шипучий солевой раствор.

Спрей назальный с морской водой «Спарклин» создан на основе морской воды из Гульмарсфьорден/Gullmarsfjorden, который представляет собой 25-километровый морской фиорд, расположенный на западном побережье Швеции, из которого водозабор осуществляется с глубины 32 м (*m*) ниже уровня моря. После заполнения алюминиевого флакона конечный продукт стерилизуется с гарантией стерильности в течение всего срока хранения.

СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ «СПАРКЛИН» ПРИМЕНЯЕТСЯ:

- для очищения носовой полости от густого секрета, кровяных сгустков, аллергенов, раздражающих веществ, посторонних частиц, таких, как пыль, цветочная пыльца;
- для восстановления проходимости носовых путей и носового дыхания;
- в составе комплексного лечения и с целью профилактики ОРЗ, ОРВИ, простуды, для очищения слизистой оболочки носа от болезнетворных бактерий и вирусов и облегчения состояния пациента;
- для лечения острых и хронических риносинуситов;
- для облегчения местных симптомов при острых и хронических риносинуситах, при острых инфекциях верхних дыхательных путей. У лиц, часто болеющих ринитами и синуситами, регулярное применение спрея назального с морской водой «Спарклин» позволяет сократить применение лекарственных средств;
- для лечения аллергического ринита;
- для облегчения местных симптомов при аллергии;
- для увлажнения при сухости и раздражении слизистой оболочки носовой полости;
- для торможения образования и созревания биопленок;
- содействует разрушению биопленок;
- для подготовки носовой полости перед применением других лекарственных средств с целью очищения и удаления трудно отделяемого содержимого;
- для ухода за носовой полостью после оперативных вмешательств;
- для ежедневной гигиены носовой полости.

СВОЙСТВА СПРЕЯ НАЗАЛЬНОГО С МОРСКОЙ ВОДОЙ «СПАРКЛИН»:

- разжижает и выводит из носовой полости густой секрет, корочки, кровяные сгустки;
- шипучий солевой раствор содержит маленькие пузырьки для более эффективного очищения от слизи по сравнению с обычными солевыми растворами;
- нормализует мукоцилиарный транспорт;
- очищает слизистую оболочку носа от пыли, аллергенов и раздражающих веществ;
- при простудах и аллергиях разжижает и уменьшает вязкость секрета, тем самым способствуя его выведению;
- CO₂ создает шипучий спрей, который разрушает биопленки, тормозит их рост и созревание;
- путем промывания и орошения уменьшает количество болезнетворных микроорганизмов на слизистой оболочке носа;
- не вызывает зависимости и может применяться с другими лекарственными средствами;

- помогает уменьшить применение лекарственных средств при регулярном употреблении лицами, часто болеющими ринитами и синуситами;
- помогает в нормализации pH назального секрета;
- не содержит консервантов;
- является стерильным продуктом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Снять крышку.
2. Удерживая флакон под любым углом, осторожно ввести наконечник насадки в каждую ноздрю, нажимая 1-2 секунды.

Благодаря химическому составу и концентрации длительность и кратность применения спрея назального с морской водой «Спарклин» не ограничены, изделие является безопасным при длительном применении, не вызывает привыкания.

СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ С МОРСКОЙ ВОДОЙ «СПАРКЛИН» ПРИМЕНЯЕТСЯ для взрослых и детей с 2-х лет.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Применение изделия более, чем одним лицом может вызвать распространение инфекции, поэтому после каждого применения следует вымыть наконечник насадки с мылом и ополоснуть горячей водой.

Спрей назальный с морской водой «Спарклин» можно применять в период беременности и кормления грудью.

Спрей назальный с морской водой «Спарклин» не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами.

Сообщение о каком-либо серьезном инциденте, случившемся с медицинским изделием

Для обеспечения дальнейшего эффективного и безопасного применения медицинского изделия просим сообщать о побочных эффектах и инцидентах, обнаруженных в процессе применения этого медицинского изделия, оператору рынка: АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская 63, тел. +38 (044) 239 19 40.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Спрей назальный с морской водой «Спарклин» хранить при температуре от +15 °С до + 30 °С. Защищать от солнечного света.

Флакон под давлением: при нагревании может взорваться. Не прокалывать и не бросать в огонь после использования. Держать вдали от жара, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других очагов возгорания. Не курить. Не подвергать действию температуры, превышающей 50 °С. Не распылять в глаза.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года с даты изготовления. Использовать до даты, указанной на упаковке и флаконе.










ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АО «Фармак», Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Произведено Аурена Лабораторис ЭйБи, Фьярвиксваген 226 ЭСИ-653 50 Карлстад, Швеция/Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АО «Фармак», Украина.

Дата последнего пересмотра. 08.11.2019 г.



Графические символы

	Производитель		Ограничение температуры
	Оберегать от солнечного света		Ознакомление с инструкцией для применения
	Символ возможности повторного использования и переработки (PAP – из бумаги и картона; 21 – другие виды картона)		Стерилизовано с использованием излучения
	Символ «Национальный знак соответствия медицинских изделий»		Номер серии (партии)
	Использовать до		