



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ
медичного виробу
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «СПАРКЛІН»

ТОРГОВА НАЗВА: Спрей назальний з морською водою «Спарклін».

ФОРМА ВИПУСКУ: спреї назальний.

1 алюмінієвий флакон під тиском об'ємом 125 мл (ml).

ОПИС: прозорий безбарвний або жовтуватий розчин.

СКЛАД:

100 г (g) спрею містять 100 г (g) стерильної ізотонічної морської води (розведеної до ізотонічної концентрації (0,9 %) водою очищеною), з додаванням 0,4 % CO₂, що створює шипучий сольовий розчин.

Інноваційна розробка США - запатентована формула потрібної дії, яка захищена патентами в багатьох країнах світу.

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» створений на основі морської води з Гульмарсфьорден/Gullmarsfjorden, який являє собою 25-кілометровий морський фіорд, розташований на західному узбережжі Швеції, з якого водозбір здійснюється з глибини 32 м (m) нижче рівня моря. Після заповнення алюмінієвого флакону кінцевий продукт стерилізується з гарантією стерильності протягом всього терміну зберігання.

СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «СПАРКЛІН» ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ для дорослих та дітей від 2-х років:

- для очищення носової порожнини від густого секрету, кров'яних згустків, алергенів, подразнюючих речовин, сторонніх часточок, таких як пил, квітковий пилок;
- для відновлення прохідності носових шляхів та носового дихання;
- у складі комплексного лікування та з метою профілактики ГРЗ, ГРВІ, застуди, для очищення слизової оболонки носу від хвороботворних бактерій і вірусів та полегшення стану пацієнта;
- для лікування гострих та хронічних риносинуситів;
- для полегшення місцевих симптомів при гострих та хронічних риносинуситах, при гострих інфекціях верхніх дихальних шляхів. У осіб, які часто хворіють на риніти та синусити, регулярне використання спрею назального з морською водою «Спарклін» дозволяє скоротити застосування лікарських засобів;
- для лікування алергічного риніту;
- для полегшення місцевих симптомів при алергії;
- для зволоження при сухості та подразненні слизової оболонки носової порожнини;
- для гальмування утворення та дозрівання біоплівки,
- сприяє руйнуванню наявних біоплівки;
- для підготовки носової порожнини перед застосуванням інших лікарських засобів з метою очищення та видалення вмісту, який важко відділяється;
- для догляду за носовою порожниною після оперативних втручань;
- для щоденної гігієни носової порожнини.

ВЛАСТИВОСТІ СПРЕЮ НАЗАЛЬНОГО З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ «СПАРКЛІН»:

- нове покоління сольового розчину та морської води, наповненого мікробульбашками, створюють формулу потрібної дії, що забезпечує проникнення глибоко в носові ходи,

допомагаючи більш ефективно очистити ніс від слизу, порівняно зі звичайними сольовими розчинами та зменшити закладеність носу;

- розріджує та виводить з носової порожнини густий секрет, кірочки, кров'яні згустки;
- нормалізує мукоциліарний транспорт;
- очищує слизову оболонку носа від пилу, алергенів та подразнюючих речовин;
- при застудах та алергіях розріджує та зменшує в'язкість секрету, таким чином сприяючи його виведенню;
- CO₂ створює шипучий спрей, який руйнує біоплівки, гальмує їх ріст та дозрівання;
- шляхом промивання та зрошування зменшує кількість хвороботворних мікроорганізмів на слизовій оболонці порожнини носа;
- не викликає залежності та може використовуватись з іншими лікарськими засобами;
- допомагає зменшити застосування лікарських засобів при регулярному використанні часто хворіючими ринітами та синуситами;
- допомагає у нормалізації рН назального секрету;
- не містить консервантів;
- являє собою стерильний продукт.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Зняти кришку.
2. Тримавши флакон під будь-яким кутом, обережно ввести наконечник насадки у кожен ніздру, натиснути на 1-2 секунди.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:

Використання засобу більш ніж однією особою може викликати поширення інфекції, тому після кожного застосування слід вимити наконечник насадки з милом та ополоснути гарячою водою. Спрей назальний з морською водою «Спарклін» можна застосовувати в період вагітності та годування груддю.

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» не впливає на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами та роботі з іншими механізмами.

Завдяки хімічному складу та концентрації тривалість і кратність використання спрею назального з морською водою «Спарклін» не обмежені, виріб є безпечним при тривалому застосуванні, не викликає звикання.

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався при застосуванні медичного виробу

Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, просимо повідомляти про інциденти, виявлені у процесі застосування цього медичного виробу, АТ «Фармак» за телефоном +38 (044) 239 19 40.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Спрей назальний з морською водою «Спарклін» зберігати при температурі від +15 °С до +30 °С. Захищати від сонячного світла.



Попередження!

Флакон не кидати!

Флакон під тиском: при нагріванні може вибухнути. Не проколувати і не кидати у вогонь після використання. Тримати подалі від жару, гарячих поверхонь, іскор, відкритого вогню та інших джерел займання. Не палити. Не піддавати дії температури, що перевищує 50 °С.

Не розпилювати в очі.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 3 роки з дати виготовлення. Використати до дати, зазначеної на упаковці та флаконі.

ВИРОБНИК: АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.

Виготовлено: Аурена Лабораторіс ЕйБі, Фьярвіксваген 22, Есі-653 50 Карлстад, Швеція/Aurena Laboratories AB, Fjarrviksvagen 22, SE-653 50 Karlstad, Sweden для АТ «Фармак», Україна.

www.farmak.ua

Дата останнього перегляду: 20.02.2024.



Графічні символи

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Виробник | | Температурне обмеження |
| | Оберігати від сонячного світла | | Зверніться до інструкції із застосування |
| | Символ можливості повторного використання та перероблення (PAP – з паперу та картону; 21 – інші види картону) | | Стерилізовано опроміненням |
| | Знак відповідності Технічним регламентам (UA - умовне позначення України латинськими літерами; TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів; YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності) | | Номер серії (партії) |
| | Використати до | | Не використовувати в разі пошкодження пакування |
| | Вказує на необхідність для користувача ознайомитися із такою важливою інформацією інструкції із застосування, як попередження | | |