



**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ**  
**медичного виробу**  
**Бусті спрей аміно**  
**Boosty spray amino**

**ТОРГОВА НАЗВА:** Бусті спрей аміно (Boosty spray amino).

**ФОРМА ВИПУСКУ:** Спрей нашкірний. По 50 мл (ml) у флаконі поліетиленовому з насосом-дозатором та розпилювачем адаптером. По 1 флакону у пачці з картону.

**ОПИС:** Рідина зі специфічним запахом, прозора або з легкою опалесценцією, від безбарвного до жовто-коричневого кольору. Виріб дозується з флакона за допомогою розпилювача у вигляді аерозольного струменя.

**СКЛАД:** декаметоксин, колаген низькомолекулярний гідролізований, гліцин, аргінін, аспарагінова кислота, вода очищена.

**ВЛАСТИВОСТІ:**

Завдяки компонентам медичний виріб «Бусті спрей аміно» підтримує чистоту рани, запобігаючи розвитку патогенних мікроорганізмів.

Низькомолекулярний гідролізований колаген є особливою легкозасвоюваною формою колагену - найважливішого компонента сполучної тканини, що входить у склад хрящів, сухожиль, зв'язок, кісток, зубів, шкіри і кровоносних судин.

Амінокислоти, наявні у складі спрею, допомагають шкірі синтезувати необхідні протеїни та поживні речовини, утримувати вологу, відновлювати пошкоджені вільними радикалами клітини організму.

Декаметоксин має виражений бактерицидний вплив на стафілококи, стрептококи, капсульні бактерії, дифтерійну та синьогнійну палички та фунгіцидну дію на дріжджі, дріжджоподібні гриби, збудників епідермофітії, трихофітії, мікроспорії, еритразми, деякі види пліснявих грибів (аспергіли, пеніцили); протистоцидну дію на трихомонади, лямблії; віруцидну дію на віруси. Декаметоксин є високоактивним відносно мікроорганізмів, стійких до дії антибіотиків.

**СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:** Засіб використовується у комплексному лікуванні простих непроникних ран (ушкодження тільки шкіри та підшкірної клітковини). А саме:

- свіжоінфікованих ран (до 3 діб з моменту ушкодження) або ран із підвищеним ризиком інфікування;
- післяопераційних (неінфікованих) ран;
- виразок змішаної етіології;
- пролежнів;
- опіків першого і другого ступенів;
- відморожень.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

Флакон добре струсити перед використанням. Після очищення рани від забруднення 0,9 % розчином натрію хлориду, або розчином антисептика, наносити тонкий шар спрею на уражені ділянки, розпилюючи з відстані 10 см, 2 рази на добу. Може використовуватись під стерильну пов'язку або відкритим способом. Частота використання може бути збільшена до 4 разів на добу. Лікування триває зазвичай 10-14 днів; перед кожним наступним нанесенням уражену поверхню необхідно промити 0,9 % розчином натрію хлориду або розчином антисептика для видалення залишків ранового ексудату. Застосовують до повного загоєння рани.

**ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ:**

Уникати контакту медичного виробу з очима та слизовими оболонками. У разі випадкового потрапляння слід промити достатньою кількістю води.

Слід уникати використання більше 14 днів.

У процесі лікування медичним виробом «Бусті спрей аміно» підвищується чутливість антибіотикорезистентних мікроорганізмів до антибіотиків.

**ВЗАЄМОДІЯ:** декаметоксин, який є у складі медичного виробу є катіонною поверхнево-активною речовиною, тому він несумісний з милом та іншими аніонними сполуками.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:**

У поодиноких випадках у деяких пацієнтів можлива підвищена індивідуальна чутливість. У таких осіб після застосування виробу можлива поява висипу на шкірі, відчуття печіння, сухості, свербіжу та інших симптомів місцевої алергічної реакції. В такому випадку проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

Наразі немає даних про застосування медичного виробу «Бусті спрей аміно» дітям, вагітним та жінкам, які годують груддю.

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався при застосуванні медичного виробу

Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, просимо повідомляти про інциденти, виявлені у процесі застосування цього медичного виробу, АТ «Фармак» за телефоном +38 (044) 239 19 40.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 2 °С до 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:** 2 роки. Використати до дати, зазначеної на упаковці.

**ВИРОБНИК:** АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.

www.farmak.ua

Дата останнього перегляду: 02.07.2024.



**Графічні символи**

Символ	Визначення символу	Символ	Визначення символу
	Виробник		Температурне обмеження
	Не використовувати в разі пошкодження пакування		Зверніться до інструкції із застосування
	Символ можливості повторного використання та перероблення (PAP – з паперу та картону; 21 – інші види картону)		Дата виготовлення
	Знак відповідності Технічним регламентам (UA - умовне позначення України латинськими літерами; TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів; YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності)		Номер партії
	Використати до		