



**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ**  
**медичного виробу**  
**«Фітобор»**

**супозиторії вагінальні для захисту слизової оболонки та для підтримування рН**

**ТОРГОВА НАЗВА:** «Фітобор».

**ФОРМА ВИПУСКУ:** супозиторій вагінальний; по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 або 3 блістери у пачці з картону.

**ОПИС:** супозиторії від світло-коричневого до коричневого кольору з вкрапленнями екстракту, сигароподібної форми, із специфічним запахом. На зрізі допускається наявність повітряного стрижня або лійкоподібної заглибини.

**СКЛАД:** 1 супозиторій містить кислоти борної 600 мг (mg), сухий екстракт центелли азійської, твердий жир.

**СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ:** медичний виріб «Фітобор» використовується у комплексному лікуванні вагінальних грибкових інфекцій, таких як рецидивуючий вульвовагінальний кандидоз; вульвовагінальний кандидоз, спричинений *Candida non-albicans*.

**СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:**

1. Перед застосуванням медичного виробу ретельно вимити руки та піхву.
2. Відкрити упаковку і вийняти з блістера один супозиторій.
3. Обережно ввести супозиторій глибоко у піхву, бажано в положенні лежачи на спині, уникаючи його випадкового випадання з піхви.

Застосовувати на ніч по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом 14 днів.

Підтримуюча схема – по 1 супозиторію 2 рази на тиждень протягом 8 тижнів.

Тривале застосування може призвести до підвищення чутливості піхви. У цьому випадку слід припинити застосування супозиторіїв та звернутися до лікаря, щоб розпочати відповідне лікування. У разі одночасного застосування з іншою терапією або іншими лікарськими засобами або медичними виробами слід проконсультуватися з лікарем.

Не використовувати під час менструації.

У випадку інтактної дівочої пліви перед використанням слід проконсультуватись у гінеколога щодо особливостей застосування.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

Використовувати лише інтравагінально. Не ковтати.

Не застосовувати при індивідуальній підвищеній чутливості до будь-якого з компонентів виробу.

Не перевищувати рекомендоване дозування без призначення лікаря.

Кожен супозиторій призначений для одноразового використання. Не використовувати у разі випадкового випадіння з піхви.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування виробу та звернутися до лікаря.

Немає досвіду застосовування у дітей, вагітних та жінок, які годують груддю.

Номер партії вказано на пакуванні.

Не використовувати медичний виріб в разі пошкодження первинного пакування.

Повідомлення про будь-який серйозний інцидент, який стався при застосуванні медичного виробу

Для забезпечення подальшого ефективного та безпечного застосування медичного виробу, просимо повідомляти про інциденти, виявлені у процесі застосування цього медичного виробу, АТ «Фармак» за телефоном +38 (044) 239 19 40.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:**

Зберігати при температурі від 2 °С до 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:** 3 роки. Використати до дати, зазначеної на пакуванні.

**ВИРОБНИК:** АТ «Фармак», Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 63.

www.farmak.ua

Дата останнього перегляду: 05.03.2026.



**Графічні символи**

Символ	Визначення символу	Символ	Визначення символу
	Виробник		Температурне обмеження
	Використати до		Зверніться до інструкції із застосування
	Символ можливості повторного використання та перероблення (PAP – з паперу та картону; 21 – інші види картону)		Номер партії
 UA.TR.YYY	Знак відповідності Технічним регламентам (UA - умовне позначення України латинськими літерами; TR - умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів; YYY - ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності)		Дата виготовлення
	Не використовувати в разі пошкодження пакування		Повторно не використовувати
	Попередження		